



CARACTERÍSTICAS

A BECKER PEROX ADVANCED é um desinfetante de nível intermediário que possui tripla ação, pois limpa, desinfeta e desodoriza ambientes hospitalares e demais estabelecimentos de assistência à saúde. Possui em sua composição peróxido de hidrogênio e quaternário de amônio de 5ª geração. Pode ser utilizado em superfícies fixas, áreas críticas, semicríticas e não críticas, artigos não críticos, materiais de inaloterapia e assistência ventilatória. Possui ação bactericida (*Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus* MRSA, *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase (KPC), *Acinetobacter baumannii*, *Enterococcus faecium* VRE), fungicida (*Trichophyton interdigitale* priestley, *Candida albicans*, *Candida auris*, *Aspergillus brasiliensis*), tuberculicida (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium smegmatis*) e esporocida (*Clostridium difficile*). Possui em sua composição matérias-primas biodegradáveis.

ESPECIFICAÇÕES

Física

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

pH: 2,0 – 3,0

Teor de ativo catiônico: 6%

Teor de Peróxido de Hidrogênio: 6%

Química

Composição: Peróxido de hidrogênio, cloreto de dialquil dimetil amônio/cloreto de alquil dimetil benzil amônio, tensoativo não iônico, acidificante e água.

FINALIDADE

Desinfecção hospitalar de nível intermediário.

MODO DE USO

Desinfecção de nível intermediário: Lavar, enxaguar e secar os materiais de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergi-los na solução do Becker Perox Advanced, utilizar diluição em água de 1:25 (40 mL do produto para 1 litro de solução), deixar em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar esses materiais.

Desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução do Becker Perox Advanced, utilizar diluição em água de 1:25 (40 mL do produto para 1 litro de solução)



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
BECKER PEROX ADVANCED
Desinfetante Hospitalar de Nível Intermediário

FT- 0613
Revisão: 06
Emissão: 22/02/2024

até 1:100 (10 mL para 1 litro de solução), deixar em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Limpeza, desodorização e desinfecção de superfícies fixas em uma única etapa: aplicar a solução do Becker Perox Advanced, utilizar diluição em água de 1:25 (40 mL do produto para 1 litro de solução) até 1:100 (10 mL para 1 litro de solução), deixar em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Limpeza pesada de pisos e superfícies em geral: aplicar a solução do Becker Perox Advanced, utilizar diluição em água de 1:150 (6,7 mL do produto para 1 litro de solução), deixar secar ou enxaguar se necessário.

Limpeza diária de pisos e superfícies em geral: aplicar a solução do Becker Perox Advanced, utilizar diluição em água de 1:300 (3,3 mL do produto para 1 litro de solução), deixar secar ou enxaguar se necessário.

| Eficácia | Diluição |
|---|----------|
| Staphylococcus aureus | 1:100 |
| Salmonella choleraesuis | 1:100 |
| Pseudomonas aeruginosa | 1:100 |
| Escherichia coli | 1:100 |
| Enterococcus hirae | 1:100 |
| Staphylococcus aureus MRSA | 1:100 |
| Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) | 1:100 |
| Acinetobacter baumannii | 1:100 |
| Enterococcus faecium VRE | 1:100 |
| Candida albicans | 1:100 |
| Candida auris | 1:100 |
| Aspergillus brasiliensis | 1:100 |
| Trichophyton interdigitale priestley | 1:25 |
| Mycobacterium bovis | 1:25 |
| Mycobacterium smegmatis | 1:25 |
| Clostridium difficile | 1:25 |

EMBALAGEM

Caixa com 4 unidades de 5L.